

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ЛАЗЕРОВ И АППАРАТОВ. ОСНОВНОЙ САЙТ

Главная. Ремонт, продажа диодных лазеров. Запчасти для аппаратов.

Добрый день! В данном разделе сайта представлены различные запасные части, которые в наличии. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР запасных частей под заказ, скидки для постоянных клиентов.

Если нужна консультация, то переход в ватс апп [whats app](#) .

На фотографиях ниже запасные части, ссылки на видео и краткое описание.

На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 600 ватт 6 бар , лазерный излучатель, диодный стек 600 ватт LST, DVS, HT, COE, adss, HR, диодная матрица 600 ватт адсс amig-x . Данный стек пригоден для лазера adss fg2000b, fg2000d.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 500 ватт 10 бар , лазерный излучатель, диодный стек 500 ватт производителей LST, DVS, HT, COE, HR. Макро

канальная диодная матрица 500 вт 10 бар стоит в аппарат ozero khanka pioner, stelle laserDPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2), adss fg2000b.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро канальная диодная матрица, диодная сборка для аппарата золлазер, zollaser, кирс 144 (kiers 144) мощностью 600 ватт 6 бар..

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро канальная диодная матрица, диодная сборка для аппарата Хонкон (Honkon) мощностью 800 ватт 8 бар. Так еще бывает 12 бар 1200 ватт.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро канальная диодная матрица, диодная сборка мощностью 800 ватт. Слева 16 бар, посередине 8 бар и справа 8 бар. Это пример , что даже одна мощность диодного стека может выглядеть конструктивно по разному.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже **ОРИГИНАЛЬНАЯ** макро канальная диодная матрица, диодная сборка для аппарата adss fg2000b, fg2000d мощностью 600 ватт 6 бар.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро каналные диодные матрицы, диодные сборки одного производителя . В данном размере корпуса бывает 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 ватт.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже макро каналная диодная матрица, диодная сборка для аппарата pz laser мощностью 500 ватт 10 бар.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтры для кирс 144 (kiers 144).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтры для лазеров ozero khanka ok01 и pioneer.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 200 ватт 4 бара , лазерный излучатель, диодный стек 200 ватт LST, DVS, HT, COE, HR, диодная матрица данной мощности стоит в самых простых аппаратах.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 350 ватт 7 бар и есть 400 ватт 8 бар , лазерный излучатель, диодный стек 350 ватт LST, DVS, HT, COE, довольно редкая модель.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 600 ватт 12 бар , лазерный излучатель, диодный стек 600 ватт LST, DVS, HT, COE, adss, HR, диодная матрица 600 ватт .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 250 ватт 5 бар , лазерный излучатель, диодный стек 250 ватт LST, DVS, HT, COE, adss, HR, диодная матрица 250ватт.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: лазерный бар 300 ватт 6 бар , лазерный излучатель, диодный стек 600 ватт LST, DVS, HT, COE, adss, HR, диодная матрица 300 ватт .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера Хонкон 1200кк.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр с полипропиленом для очистки воды диодного лазера **STELLE LASER** DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера Хонкон 1200кк.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера Хонкон 1200кк.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр с ионной смолой для очистки воды диодного лазера
STELLE LASER DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2,
ALD-2.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера для производителя KEY LASER k18, k20, k19, k21, k800, k22K808, K810, K808pro, UNTLASER.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фильтр для очистки воды диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D. Меняется 1 раз в 3 месяца.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера Honkon (Хонкон) 1200кк 800кк 808.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы фотоэпилятора, elos, ipl.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного фото эпиляции .
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера Honkon (Хонкон).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера stelle laser. Примеры аппаратов DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2 .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый корпус ручки, манипулы диодного лазера key laser.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый держатель ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пластиковый держатель ручки, манипулы фото эпилятора, ipl, elos.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фитинг ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D. Такой же используется для залива воды.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже шнур ручки стронг Strong 90/120, Strong 207b, Strong 120, Strong H150, Eve&Touch 7, Eve&Touch 9, Ocius EFS, QP 800 Nail Filling System, Strong 105L, Brilliant B160, Strong 793/102L, Strong 210/120, Strong 90/102, Strong 207A/120, Strong 102 L, Strong 105L, Strong 107II, .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧКА ДИОДНОГО ЛАЗЕРА. Поможет удешевить ремонт известных аппаратов)

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже масляный фильтр для kim 8 Slimming System, SA-B05, SA-6048, KIM-8, WL919S, SA B05, AURO, K10, RS-08, ким8, MS-54D1.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже щетки lpg. Графит подходит ко многим моделям аппаратов LPG.

ссылка на [youtube](#) .




На фотографии ниже реле диодного лазера. Из-за него бывают проблемы с охлаждением воды в некоторых аппаратах.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже трансформатор маникюрного аппарата strong210 (стронг 210).

ссылка на [youtube](#) .

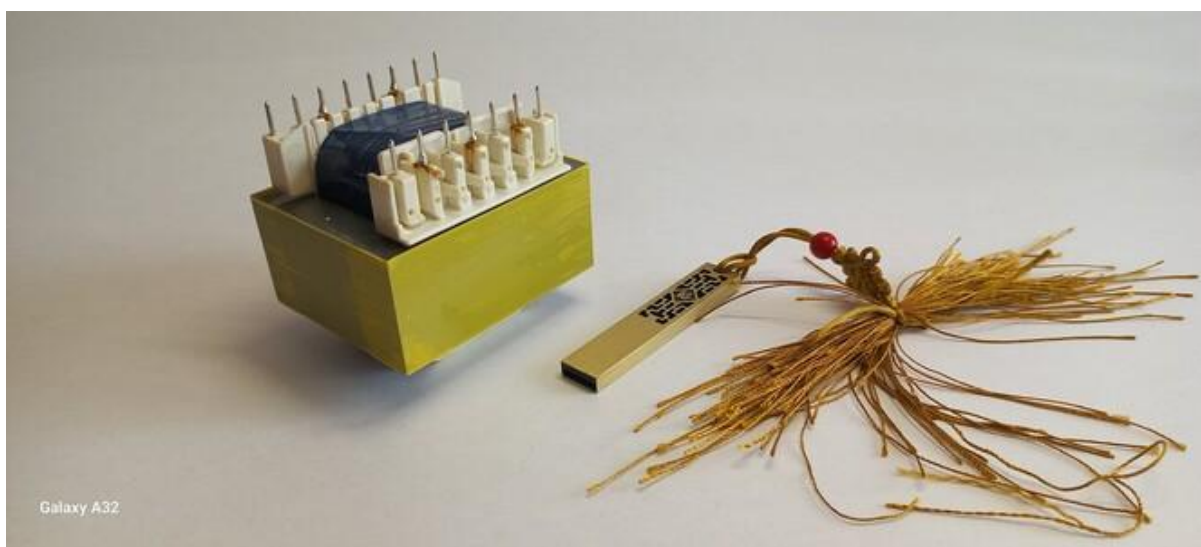

На фотографии ниже серая педаль. Возможно поставить в аппарат для маникюра, блок машинки для татуажа, использовать в лазере для удаления тату..

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже экран для kim 8 Slimming System,SA-B05,SA-6048. Монитор (дисплей, экран, тацскрин, табло) для KIM-8,WL919S,SA B05,AURO,K10, RS-08, ким8, MS-54D1. На фото один из вариантов. Например только в ким8 - 3 варианта расположения шлейфов. ВНАЛИЧИИ ТАК ЖЕ ТАЧСКРИНЫ, СЕНСОРНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ДИОДНЫХ ЛАЗЕРОВ.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже желтая кварцевая уф трубка ручки фото эпилятора pve2020, dflaser. В аппаратах ipl стоят разные размеры по длине и диаметру. Например в ручку pe2020 диаметром 13 мм, но это размер подходит не для всех ручек. Я советую при транспортировке зимой сливать воду из аппарата.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже призма ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D. Для ручки как на фото ниже бывает 2 варианта по длине. Перед заказом нужен точный размер.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже разъем аппарата фото эпиляции, диодного лазера. Обычно меняется из-за подгоревших контактов.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже призма ручки , манипулы диодного лазера DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже мембрана компрессора ким8. Иногда лопается 1 из 2 в компрессоре.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии радиатор диодного лазера, аппарата криолиполиза и другого косметологического оборудования.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запасная мембрана помпы диодного лазера Honkon, ozero khanka, keylaser и других. Частая проблема- капает из под помпы , водяного насоса диодных лазеров.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже наконечник для зоны ушей, носа диодного лазера Хонкон (Honkon).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже излучатель ручки кавитации косметологического комбайна ким8.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже моторчик манипулы аппарата lpg v8c1, v8c+.
ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже водяная помпа для диодного лазера. В данном случае есть на 12 и 24 вольта. Подходит для лазерных аппаратов DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2 .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже мотор воздушного потока, двигатель пылесоса педикюрного аппарата мощностью 300 ватт. Подходит для аппаратов для педикюра с пылесосом подомастер, подотроник (podomaster, podotronic).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже элементы Пельтье ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D нового образца. Если ручка диодного лазера перестала охлаждать - одна из причин выход элементов Пельтье. Так же во время ТО раз в год следует менять термопасту. В ручке 1200 ватт стоит элемент Пельтье чуть большего размера.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже элементы Пельтье ручки, манипулы диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D старого образца. Если ручка диодного лазера перестала охлаждать - одна из причин выход элементов Пельтье. Так же во время ТО раз в год следует менять термопасту.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже погружная помпа , водяной насос для неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ксеноновая лампа элос эпилятора, ipl, elos ТОЛЩИНОЙ 9 ММ (отмечу, что стандартные толщиной 7 мм). Довольно редкая лампа фото эпилятора так же есть в наличии.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже радиатор неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже подшипники berthold sx35, gerlach technic.

ссылка на <https://www.youtube.com/shorts/OgJ6P4YEWDY>youtube .



На фотографии ниже элементы Пельтье tec1-6308 ручки фото эпилятора magneto 360 и других. . Размер 40*20 мм.

ссылка на [youtube](#) .




На фотографии ниже элементы Пельтье ручки фото эпилятора dflaser, pve2020 . Размер 40*20 мм, но не стандартная толщина. В наличии детали от завода ADSS.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже электронная плата управления лазера stelle laser. Примеры аппаратов DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2 .

ссылка на [youtube](#) .

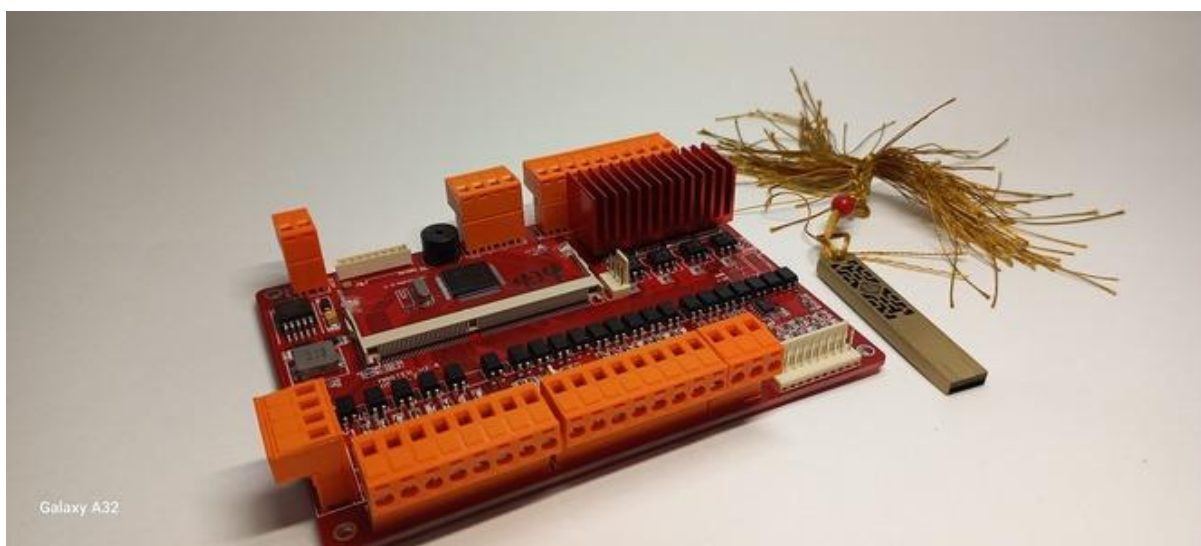

На фотографии ниже элементы Пельтье для ручки лазера stelle laser. Размер 30*30 мм. В наличии tec1-12706, tec1-12704, tec1-12705, tec1-12708, tec1-12709. Довольно популярный размер. Примеры аппаратов DPL-4C, DPL-4B, ALD-1, LD-6, APQ-1S, DPL-4A, APDL-2B, ADL-5, LD-5, LD-2, ALD-2 .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже подшипники ручки маникюрной ручки. Подшипники подходят для наконечников ручек моделей: Strong 90/120, Strong 207b, Strong 120, Strong H150, Eve&Touch 7, Eve&Touch 9, Ocious EFS, QP 800 Nail Filling System, Strong 105L, Brilliant B160, Strong 793/102L, Strong 210/120, Strong 90/102, Strong 207A/120, Strong 102 L, Strong 105L, Strong 107II, Strong Aurora 210, Strong Aurora 102, Strong 210/107II, Brilliant, Brilliant B120/H151, marathon и других (в копиях и аналогах ручек могут быть подшипники других размеров, перед заказом рекомендуется сравнить размеры).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже черная педаль. Возможно поставить в аппарат для маникюра, блок машинки для татуажа, использовать в лазере для удаления тату.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже комплект подшипников ручки педикюрного аппарата. Комплект подшипников для ручки педикюрного аппарата с пылесосом.
ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ВЫБИРАЦИЮ РУЧКИ - ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКОВ. В продаже имеются запасные подшипники для педикюрных аппаратов немецкого производителя unitronic: Podomaster Classic, Podomaster MaxiJet 30, Podomaster Smart, Podolog Eco, Podolog Nova 2 3, Podomaster Professional, Podomaster TurboJet 40, Podomaster AquaJet 40, Feetlner Eco, Feetlner Flex, Feetlner Prime, ПОДОТЕХ 40, podotronic s30, podotronic s40, Podotech 30, Podotech 40, , Podomaster(подолог, подомастер, подотеч).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ксеноновая лампа ручки неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Диаметр 6 мм, общая длина 140 мм, 130 мм по стеклу, расстояние 75мм между дугами. В некоторых лазерах бывает диаметром 7 мм. Если у Вас упала мощность, то нужно менять ксеноновую лампу в ручке лазера для удаления тату.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже белый датчик потока жидкости в диодном лазере. Данная деталь показывает, когда нет циркуляции по водяной системе диодного лазера. Отмечу, что если не будет циркуляции жидкости, то из-за перегрева выйдет из строя диодный стек, лазерный бар. В данном случае 3х-проводный.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже черный датчик потока жидкости в неодимовом лазере. Данная деталь показывает, когда нет циркуляции по водяной системе Nd:YAG лазера. Внутри стоит магнит с герконом. Отмечу, что если не будет циркуляции жидкости, то из-за перегрева выйдет из строя ручка лазера для удаления татуажа.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии кнопки для ручки аппарата фото эпиляции dflaser, pve2020 производителя косметологического оборудования в Китае компании ADSS.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже черное зеркало ручки неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Иногда бывает проблемы с напылением, что не дает ручки неодимового лазера корректно работать.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже универсальная ручка неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Ручка содержит красный прицел, счетчик вспышек. Данная ручка без разъема - берется со старой ручки. Но подходит ко всем классическим аппаратам удаления тату.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже квадрон ручки неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Внутри будет располагаться ксеноновая лампа, кристалл. Обычно проблемы с квадроном, если был перегрев ручки неодимового лазера и внутренний слой становится черным, а должен быть белым.

ссылка на [youtube](#) .




На фотографии ниже Кристалл неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга. Частые проблемы: кристалл раскололся от удара, перегрева, испортилось напыление. Кристалл лазера для удаления тату имеет направление. При замене в ручке требуется юстировка (настройка пятна). Если нет фокусировки при работе ручки неодимового лазера - 99% проблема именно в кристалле .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже элемент Пельтье тес-09512. Размер 40*30 мм.

ссылка на [youtube](#) .

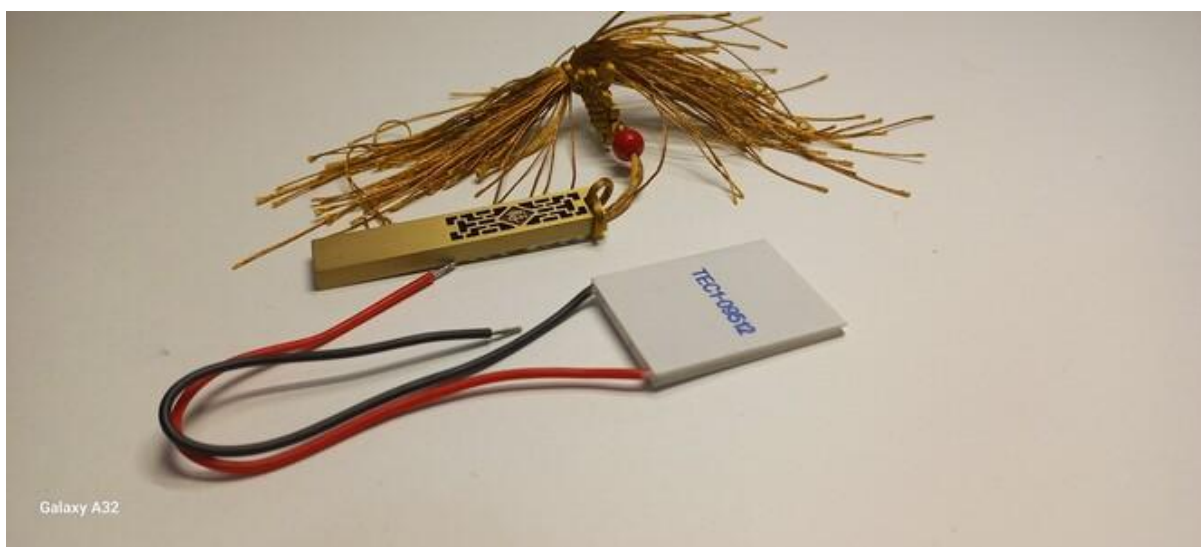


На фотографии ниже пластиковый ключ, для откручивания колбы отсека диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D. Сам производитель рекомендует иметь 2 ключа в наличии.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже белый датчик потока жидкости в неодимовом лазере. Данная деталь показывает, когда нет циркуляции по водяной системе Nd:Yag лазера. Внутри стоит магнит с герконом. Отмечу, что если не будет циркуляции жидкости, то из-за перегрева выйдет из строя ручка лазера для удаления татуажа.

ссылка на [youtube](#) .

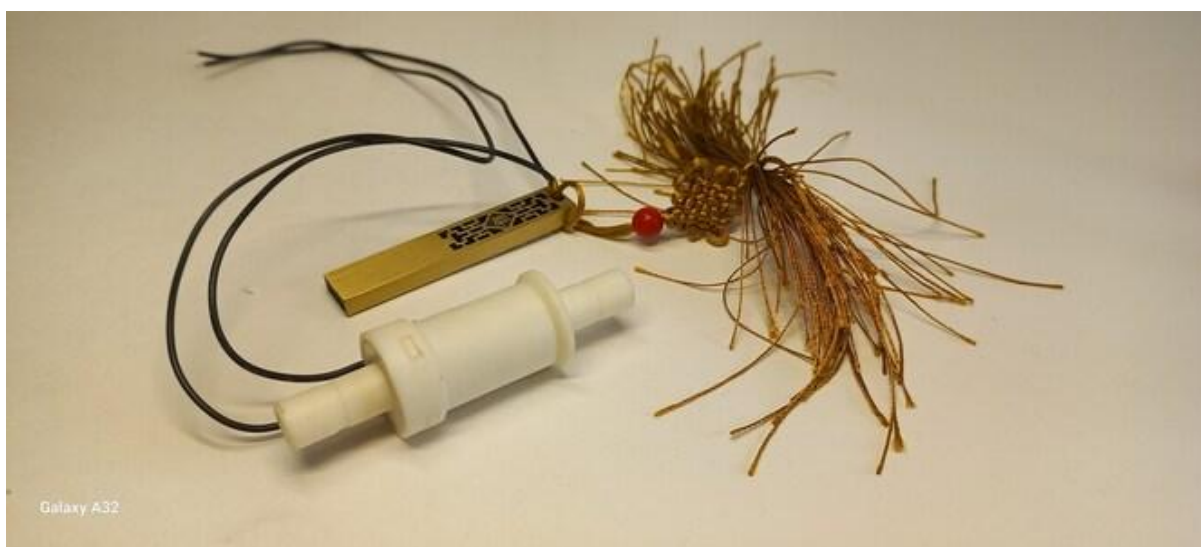

На фотографии ниже аварийная кнопка для косметологического аппарата. Выполняет роль выключателя питания.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже датчик скорости и температуры диодного лазера адсс ADSS FG2000D FG2000D.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для ручки диодного лазера: фильтр для очистки воды.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже запчасти для педикюрного аппарата. Полигон в полном сборе.

Запчасти для педикюрных аппаратов немецкого производителя unitronic: Podomaster Classic, Podomaster MaxiJet 30, Podomaster Smart, Podolog Eco, Podolog Nova 2 3, Podomaster Professional, Podomaster TurboJet 40, Podomaster AquaJet 40, Feetlner Eco, Feetlner Flex, Feetlner Prime, ПОДОТЕХ 40, podotronic s30, podotronic s40, Podotech 30, Podotech 40, , Podomaster(подолог, подомастер, подотеч)

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже насадка 1064нм неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже счетчик вспышек элос аппарата, неодимового лазера для карбонового пилинга.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже насадка 532nm неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже разъем ручки неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже сенсорный экран косметологического комбайна kim8.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже щеточный мотор ручки педикюрного аппарата podolog есо, podomaster, podotronic и др..

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже цанга, цанговый зажим для педикюрных аппаратов немецкого производителя unitronic: Podomaster Classic, Podomaster MaxiJet 30, Podomaster Smart, Podolog Eco, Podolog Nova 2 3, Podomaster Professional, Podomaster TurboJet 40, Podomaster AquaJet 40, Feetlner Eco, Feetlner Flex, Feetlner Prime, ПОДОТЕХ 40, podotronic s30, podotronic s40, Podotech 30, Podotech 40, , Podomaster(подолог, подомастер, подотеч).

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже пульт 3х моторного педикюрного кресла.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже экран для kim 8 Slimming System,SA-B05,SA-6048. Монитор (дисплей, экран, тачскрин, табло) для KIM-8,WL919S,SA B05,AURO,K10, RS-08, ким8, MS-54D1.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ручка диодного лазера padss fg2000b, fg2000d 600 ватт.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже фитинги для ручки диодного лазера.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже насадка 1320 нм неодимового лазера Nd:YAG по удалению татуировок, карбонового пилинга .

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже помпы косметологических аппаратов.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ручка лазера для удаления татуажа, карбонового пилинга.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже щеточный мотор ручки педикюрного аппарата podolog есо, podomaster, podotronic и др..

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже UK Лампы для фото эпилятора IPL, elos. 500000-1000000 выстрелов. Популярны размеры ламп:IPL:7*50*90, 7*65*125, 7*50*110, 7*65*130.

ссылка на [youtube](#) .



На фотографии ниже ручка в сборе, щеточный мотор ручки педикюрного аппарата podolog eco, podomaster, podotronic и др..

ссылка на [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=...) .



Остались вопросы? +79180110234

Блог о диодных лазерах 808нм для удаления волос, обзор устройства лазера для удаления волос, Вы можете купить напольный, настольный диодный лазер на базе android solution Pro , Prox pro, Alpha3 ANDROID, PRO2, профессиональный аппарат для эпиляции , AMUR-X , лазер с компрессором на фреоне key laser 940/800/755/1064 нм k18, кей лазер k20, k19, k21, k800, k22, k106+, k680, k690, K650, k630+, k630, K808, K810, K808pro, k6, k7, k8, k9, k11, Neo Laser Diode, диодный лазер с анализатором кожи new android untlaser, adss fg2000b, fg2000d, pve2020, fg2000d+, ozero khanka ok01, pioneer. Запасные части для аппаратов косметологии. Ремонт диодных лазеров, ручки лазера, обслуживание лазерных эпиляторов, запчасти для неодимового лазера nd:yag, водяной фильтр диодного лазера, ксеноновая лампа аппарата фотоэпиляции elos, ipl. Диодный стек 808нм мощностью 200, 250, 300, 350, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600 ватт, производитель HT, HR, DVS, LST, HD, COE, HPL. Изначально детали имеют разные обозначения, но консультация позволит подобрать нужный вариант. Диодный стек, диодная матрица, сборка, лазерный бап dvs-1004ai, dvs-1005ai, dvs-1006ai, dvs-1007ai, dvs-1008ai, GTHM-300, GTHM-500, GTHM-600, DVS-1010AI, DVS-L-1012BAI, DVS-L-1008BAI,

HPL, 500w, HD-8280-D16, HD-K280-D16, COE-VA01-A12C-500W, HD, HD-8A48-D08B, 808-HD-500W, (DVS-500AI), DVS-MS-1003BAI, DVS-1010HAI, DVS-MS-1005BAI, DVS-ML-1012BAI, DVS-ML-1008BAI, 500W, 10bars, DVS-1012AI, 600W, 12bars, 808nm, GTHM-800, 300W, 500W, 600W, 800W, 1000W, dvs-1010ai, dvs-1012ai, dvs-1016ai, HPL500, LT-0016, HR10500, DVS-1010AI, HT10500, LST-1010AI, LSR-1010AI, LSR-3334AS, LSR-3255AS, LSR-3444AS, COE-21V, HR10200, 200w, 4*50W, HR10300, 250w, 5*50W, LST-L-1010AI, LST-L-1016AI, LST-L-1016BAI, MLJK, L-3334BAS, L-3444ASMLKJ, LST-L-1012BAI, LST-L-1012AI, LST-L-1010BAI, LST-L-3334BAS, LST-L-3255AS, LAS-1005AI, LAS-1008AI, LAS-1010AI, LAS-L-1010AI, LST-3255AS, HR10300, 300w, 6*50W, HR10400, HD-8AA6-1600W, DVS-3888BAS, 7*50W, HR10500, 500w, 10*50W, HR10600, 600w, 12*50W, HR10800, 800w, 16*50W, HR10600, 600w, 6*100w, HR10800, 800w, 8*100w, COE-VA01-A12C-0600QCW, DVS-ML-1008BAI, COE-VA01-A12C-600QCW, COE-VA01-A12C-500W, COE-VA01-B12E-0600QCW, COE-VA01-B36E-0600QCW, COE-VA01-A12C-0600QC, HR11000, 1000w, 10*100w, HR11200, 1200w, 12*100w, HR11600, 1600w, 16*100w, LST-3222BAS, LST-3123AS, LST-3123AS, DVS-1003BAI, DVS-1007A, DVS-1010AI, DVS-1007AI, DVS-1010AI, LST-1006AI, LST-1005AI, LST-1010AI, LST-1012AI, LST-1006BAI, LST-1016AIDVS-1012AI, DVS-1010BAI, LAS-1004AI, LAS-1006AI, LAS-1008AI, LAS-L-1016AI.DVS-L-1012BAI, DVS-L-1016AI, DVS-L-3466BARS, DVS-L-3655BAS, DVS-L-1016BAI, DVS-L-1016BAI, DVS-L-3345BAS, DVS-L-1006BAI, LT-13CH001200N, COE-22V, DVS-L-2408BAS